

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego:

- 1) AN TAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, počawszy od daty nabycia produktu przez Kupującego..
- 2) W okresie gwarancji AN TAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) AN TAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesać na adres AN TAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.

Instrukcja obsługi AT51009 Krzesło prysznicowe AT51010 Krzesło prysznicowe



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa
ul. Zawisłańska 43
Polska
Tel.: +48 22 518 36 00
Fax: +48 22 518 36 30
www.antar.net



Wersja instrukcji obsługi: 2021-05-25.1

Data wydania aktualnej wersji instrukcji obsługi: 2021-05-21



Niniejszy symbol oznacza maksymalną wagę użytkownika

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ

Krzesła prysznicowe jako sprzęty pomocnicze przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny stanowi problem (siadanie i wychodzenie). Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

CECHY PRODUKTU:

- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa, antypoślizgowe stopki
- otwory odpływowe oraz miejsce na mydło
- regulacja szerokości nóg
- wytrzymała konstrukcja

PRZECIWSKAZANIA:

Zaburzenia koordynacji i równowagi, urazy i dysfunkcje kończyn uniemożliwiające korzystanie z wyrobu.

KONSERWACJA:

Czyścić wilgotną szmatką przy użyciu łagodnych detergentów.
Na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów.
Nie używać środków ściernych!
Nie czyścić przy użyciu agregatów ciśnieniowych lub parowych!

AT51009



Maksymalne obciążenie	120 kg
Waga:	2,2 kg
Szerokość siedziska:	50 cm
Szerokość całkowita:	50 cm
Głębokość siedziska:	29 cm
Grubość siedziska:	2,5 cm
Minimalna wysokość	35 cm
Maksymalna wysokość:	45 cm

AT51010



Maksymalne obciążenie:	120 kg
Maksymalna wysokość:	39 cm
Minimalna wysokość:	49 cm
Szerokość siedziska:	50 cm
Waga:	3 kg

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
 - czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
 - poważnego zagrożenia zdrowia publicznego
- należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Sposób utylizacji wyrobu po wycowaniu z eksploatacji

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.