

Przed użyciem należy zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do wglądu na przyszłość.



## KOMORA INHALACYJNA INTEC SPIRO KID

wraz z maseczkami dla niemowlęcia i dziecka  
INSTRUKCJA UŻYWANIA

### INFORMACJE OGÓLNE

Komora inhalacyjna wraz z maseczkami jest wyrobem medycznym służącym do podawania leków wziewnych. Zadaniem tego wyrobu jest zwiększenie ilości efektywnie dostarczonego do układu oddechowego oraz płuc leku. Pozwała to na zwiększenie skuteczności terapii leczniczej. Dzięki dwóm rozmiarom masek dostarczanych wraz z komorą, wyrób może być używany do inhalacji zarówno niemowląt, jak i starszych dzieci.

Komora inhalacyjna wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego. Membrana i maski są wykonane z silikonu. Żaden z materiałów, z których wykonano produkt, nie zawiera lateksu.

	Przedmiotowa komora inhalacyjna nie jest wyrobem sterylizowanym i nie można jej sterylizować. Można ją dezynfekować przy pomocy 75% roztworu alkoholu.
	Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez jedną osobę.
	Należy go używać tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.
	Wyrób nadaje się do użytku tylko z dozownikiem podającym odpowiednią i ściśle odmierzoną dawkę lekarstwa.
	Pacjenci cierpiący na zaawansowaną astmę i duże problemy z oddychaniem nie powinni używać tej komory inhalacyjnej do podawania leku.

### OPAKOWANIE ZAWIERA

- komorę inhalacyjną
- 2 maseczki na twarz (1 dla niemowlęcia, 1 dla starszego dziecka)
- zintegrowane z komorą mocowanie dozownika z lekiem w aerozolu
- instrukcję używania

### SPOSÓB UŻYCIA


#### CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Po wycięciu produktu z opakowania, należy go dokładnie sprawdzić. W tym celu oprócz obejrzenia komory i masek z zewnątrz, należy zajrzeć również do wnętrza komory. Pozwoli to na upewnienie się, że w jej wnętrzu nie znajdują się żadne ciała obce.

Nie należy używać produktów w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad.

Delikatnie przetrzeć komorę inhalacyjną, maseczki i inne części przy pomocy wacika nasyczonego alkoholem medycznym. Następnie należy pozostawić te elementy do wyschnięcia.


Przyłożyć jedną z dwóch masek do twarzy w celu upewnienia się czy jest szczelna. Następnie założyć odpowiednią maskę na komorę (na przód jak na rysunku poniżej).

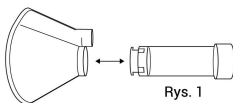

#### PRZEPROWADZANIE INHALACJI

- Przystępując do inhalacji należy upewnić się, że nakładka zawierająca mocowanie dozownika z lekiem jest odpowiednio nałożona na komorę, a także wszystkie inne elementy znajdują się na swoich miejscach.
- Następnie należy zdjąć osłonę z dozownika z lekiem i umieścić ten dozownik w mocowaniu w komorze inhalacyjnej (zob. rys. poniżej).
- Teraz trzeba potrząsnąć dozownikiem umieszczonym w tubie z nałożoną maseczką.
- Kolejnym krokiem jest przyłożenie maseczki do twarzy tak, by zakrywała usta i nos.
- Po wykonaniu wydechu, należy uruchomić dozownik i wykonując wdech natychmiast przyjąć dawkę leku.

- Przez 8-10 sekund należy wstrzymać oddech.
- Następnie, przed kolejnymi powtórzeniami inhalacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na ulotce dołączonej do lekarstwa i dozownika.
- Ilość inhalacji zależy od wskazań lekarza, który przepisał lek.
- Po zakończeniu używania należy wyjąć dozownik z lekiem z komory.

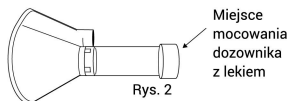

Miejsce mocowania dozownika z lekiem

#### CZYSZCZENIE

Komora inhalacyjna powinna być czyszczona regularnie – najlepiej bezpośrednio po użyciu; zwłaszcza przy widocznym zabrudzeniu.

W tym celu należy:

1. Zdjąć z tylnej części komory nakładkę umożliwiającą mocowanie dozownika leku. (Nie należy zdejmować maski lub manipulować przy zaworach powietrznych w czasie czyszczenia)
  2. Zanurzyć obydwie części na 15 minut w lekko ciepłej wodzie zawierającej detergent w płynie. Poruszać delikatnie elementami w trakcie kąpieli.
  3. Wypłukać w czystej wodzie.
  4. Wyjąć z wody i potrząsnąć. Nie wycierać do sucha.
  5. Postawić komorę z maską pionowo, a obok niej położyć nakładkę, pozostawiając je do wyschnięcia.
  6. Gdy całość wyschnie, nałożyć nakładkę do mocowania dozownika na komorę.
- Wszystkie czynności związane z czyszczeniem należy wykonywać ostrożnie. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń.

#### OSTRZEŻENIA

Komora inhalacyjna nie jest przeznaczona do zabawy. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić czy komora lub maska nie uległy uszkodzeniu. Jeżeli któraś z części jest uszkodzona, to nie należy jej używać.

Nie wolno czyścić komory i masek (razem lub osobno) w zmywarce do naczyń.

Nie wolno poddawać ich procesowi gotowania bądź sterylizacji.

Należy ich używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użycia.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać:

- w miejscu niedostępnym dla dzieci
- w suchych warunkach
- w temperaturze pokojowej.

Nie wolno narażać tych przedmiotów na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.

Produkty zawarte w opakowaniu powinny być przechowywane i używane w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Temperatura, w której przebywają, musi mieścić się w przedziale od -10°C do +40°C, a wilgotność względna nie powinna być większa niż 80%.

Produkty zawarte w opakowaniu (komora inhalacyjna i maski), użytkowane zgodnie z zaleceniami, posiadają 3-miesięczną gwarancję na właściwe działanie.

#### SYMBOLE UŻYTE NA OPAKOWANIU

	Kod partii
	Wytwórca
	Data produkcji
	Ograniczenie dopuszczalnej temperatury
	Zajrzyj do instrukcji używania

#### WYTWÓRCA:

WEGA Handel GmbH  
Herbert-Jensch-Str. 111  
15234 Frankfurt (Oder)  
[www.wegahandel.com](http://www.wegahandel.com)

#### DYSTRYBUTOR:

Intec Medical Sp. z o.o.  
ul. L. Podbiępiły 7  
31-980 Kraków  
[www.intecmedical.pl](http://www.intecmedical.pl)

Data publikacji instrukcji: październik 2017 r.

